



取扱説明書

クマレス・テラウォームは糸にテラタイト・マイクロパウダー粉末を練り込むことでテラパワーと特許製法の部分着圧設計のミリ単位段階圧力編みによって、着けるだけで脚のムクミをサポートします。また、シアバター加工を施すことにより、素肌に嬉しいしっとりしなやかな肌触りで保湿効果もアップ。暖かくソフトで快適な着用感で、長時間の着用もOKです。

【使用方法】

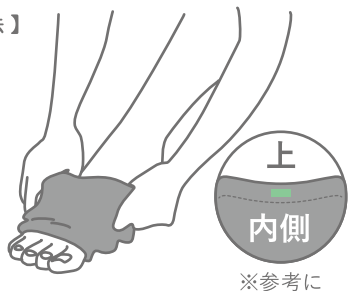

- ①上下を確認します。(内側に色のついたマークがあります。※それが上後方にくるようにします。)
- ②次にサポーターを丸めるようにして履きます。

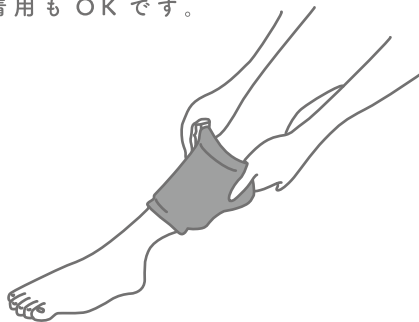

- ③左右を交互に、あまり引っ張りすぎないようにセットしていきます。



- ④最後に、手のひらで上下になじませ、フィット感を確認めます。


POINT! 着圧サポーターの脱ぎ方

丸めて一気に脱ごうとはせず、履くときと同様に「少しずつ」「均等に」「十分に」引き下げながら脱いでいきます。

※装着して足首や膝下部分に強い締め付けを感じる場合は、大きいサイズをご使用、もしくはご使用を中止してください。

【サポーターの形状・構造について】

本品は主材料の糸及び弾性糸をサポーター編機で編み上げたもので、編目の大きさと弾性糸の編み込み量のグラデーション変化により、末梢から中枢に向い漸減的に圧迫を加える構造になっています。また、特許第4055099号の製造方法により伸縮部に部分的な非伸縮部を設け、非伸縮部は漸減的に圧迫を加える構造を助けるためその面積が末梢側は広く、中枢に向い狭くなるように設計されています。

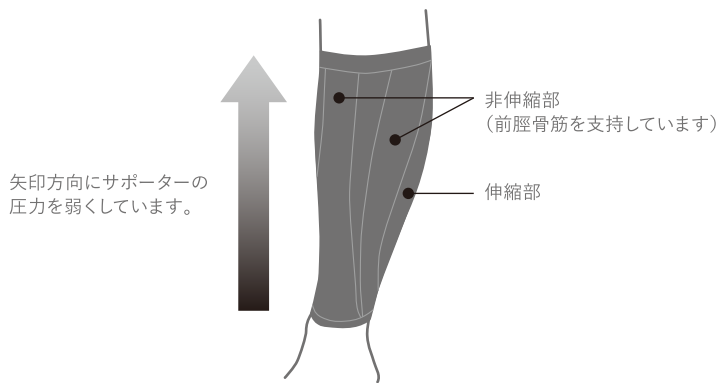

c点 16hpa(12mm Hg)
ふくらはぎ

b点 24hpa(18mm Hg)
足首

※数値は各サイズ中心の方が装着したときの平均圧力値

サイズに対応する適応範囲(ふくらはぎ最大周囲長)は、右表の通りです。適正なサイズのものをご使用ください。

【お手入れ方法】

- ・取扱については、右記取扱絵表示のとおり行ってください。
- ・水や汗に濡れたまま長時間放置しないでください。
- ・色物は他の物と一緒に洗濯しないでください。
- ・タンブラー乾燥はお避けください。
- ・アイロンはあて布を使用してください。
- ・毛玉などを防ぐため洗濯ネットに入れての洗濯をおすすめします。

【包装】1足(2枚入り)

【販売元】株式会社シンピシ
〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1-5-7 ナンパプラザビル8階
【お客様相談窓口】TEL:06-6641-3500 (平日AM10:00~PM18:30)

サイズ	フリー	LL
適応範囲 (ふくらはぎ最大周囲長)	34 ~ 39cm	38 ~ 44cm
サイズカラー表示 (サポーター上部内側)	グリーン 	イエロー

※商品のお色はブラックのみです。



(組成) ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、テラタイト・マイクロパウダー練込配合、シアバター加工